

jen pro
zvířata

Kerolan®

SPREJ

na insemináčn  rukavice
ad us. vet.

CZ PŘÍPRAVEK: KEROLAN® sprej – na insemináčn  rukavice. **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ:** AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno, Cesk  republika. **VYROBCE:** AVEFLOR, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno, Cesk  republika, IČ: 6459838, www.aveflor.cz. **SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU:** Paraffinum liquidum, Butane, Benzinium, Propane, Isobutane, Parfum. **POPIS PŘÍPRAVKU:** Bezbarv  olejovit  kapalina ve spreji. **UČEĀ:** Účinn  p pravek určen  k lubrikaci a ke zvyšen  klzlosti rukavic p  inseminaci a veterinárn m gynekologick m vyšetováním plemenic. **ZPŮSOB POUŽITÍ:** Nanáš se ze vzdálenosti 15–20 cm okolo rektu plemenic a na insemináčn  rukavice. Aplikujte t sn  p ed z krokem. **DRUH OBALU:** Hlinikov  aerosolov  n dobka s umelohmotn m uz v rem. **VELIKOST BALENÍ:** 1 x 105 g/150 ml v tlakov  aerosolov  n dobce o objemu 210 ml. **ZPŮSOB UCHOVAVÁNÍ:** P i teplot  5–25 °C. **DOBA POUŽITELNOSTI:** Do data uveden ho na dn  obalu. **BEZPEČNOSTN  OPATŘENÍ:** Extr mn  hořlav  aerosol. N dob  je pod tlakem: p  zahřívání se m že roztrhnout. Škodliv  pro vodn  organismy, s dlouhodob mi u inky. Chraňte p ed teplem, hořk mi povrchy, iskrami, otevřen m ohn m a jin mi zdroji zapálen . Z kaz kouření. Nepropichujte nebo nesp lujte ani po použit . Nestříkejte do otevřen ho ohn  nebo jin ch zdroj  zapálen . Chraňte p ed slunečn m z řen m. Nevystavujte teplot  p esahující 50 °C. Uchov vejte mimo dosah d t . Zabráňte uvoln n  do životn ho prostred . Obal likvidujte v r mci organizovan ho sb ru. **SCHV. ČÍSLO:** 154-13/C.

SK NÁZOV VET. PŘÍPRAVKU: KEROLAN® sprej – na insemináčn  rukavice. **VYROBCA:** Aveflor, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno, Cesk  republika, www.aveflor.cz. **DRŽITEL ROZHODNUTIA:** Aveflor, a.s., Budčevs 26, 507 32 Kopidlno, Cesk  republika. **ZLOŽENIE:** Medicinsk  olejovit  biely 51,1 g; Lekarsk y benz n 9,6 g; Parfum 0,1 g; Propan-but nov  zmes 39,2 g. **POPIS VET. PŘÍPRAVKU:** Bezfarebn  olejovit  tekutina v spreji. **DRUH ZVIERAT:** Plemennice. **CHARAKTERISTIKA:** Veterin rn  p pravok na lubrikáciu a zvyšenje klzlosti insemináčn ch rukavic. **OBLAST POUŽITIA:** Lubrifikácia a zvyšenje klzlosti insemináčn ch rukavic p  inseminácii a veterin rn -gynekologickom vyšetren  plemennic. **SPÔSOB POUŽITIA:** Veterin rn  p pravok sa nanáša bezprostredne p ed z krokem zo vzdialenosti 15–20 cm okolo rektu plemennic a tiez na insemináčn  rukavice. **UPOZORNENIE:** Vystražn  upozornenie: H222 Mimoriadne hořlav  aerosol. H229 N dob  je pod tlakom: P  zahřívání sa m že roztrhnúť. H412 Škodliv  pre vodn  organismy, s dlhodob mi u inkami. Bezpečenostn  upozornenie: P.210 Uchov vajte mimo dosahu tepla, hořících povrchov, iskier, otevřen ho ohňa a jin ch zdrojov zapálenia. Neřaďte. P.211 Nestříkejte na otevřen  ohň ani jin  zdroj zapálenia. P.251 Nepropichujte alebo nesp lujte ju, a to ani spotrebovan  obsahu. P.410 Chraňte pred slunečn m z ren m. P.412 Nevystavujte teplot m nad 50 °C. P.102 Uchov vajte mimo dosahu d t . P.273 Zabráňte uvolneniu do životn ho prostredia. P.501 Obal likvidujte v r mci organizovan ho zberu. **OCHRANN  LEHOTA:** Bez ochrannej lehoty. **VELIKOST BALENIA:** 1 x 105 g/150 ml v tlakov  aerosolovej n dobke s objemom 210 ml. **SPÔSOB UCHOVAVANIA:** P i teplot  10–25 °C. Uchov vat mimo d h n  a dosahu d t . **ČAS POUŽITELNOSTI:** Do datumu uveden ho na dn  obalu. **OZNACENIE:** Len pre zvierat ! Bez predpisu veterin rneho lek ra. **ČÍSLO SCHVÁLENIA:** 009/R/04-S. **DISTRIBUTOR PRE SR:** AVEPHARMA, s.r.o., Vajporsk  100/A, 831 04 Bratislava, Slovensko, www.avepharma.eu **Č. S RŽE:** na dn  obalu **EXP:** na dn  obalu



SLE0555-4

e150ml



NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČENSTVO



